

УТВЕРЖДАЮ

От имени
ООО «ВСАЛОН24»

Действующего в качестве Уполномоченного
представителя Производителя
FRESCO INTERNATIONAL 2005, S.A.
(ФРЕСКО ИНТЕРНЕЙШНЛ 2005, С.А.),
Испания

Директор
ООО «ВСАЛОН24»



подпись / signature

М.П. / stamp

I certify

On behalf of
LLC «VSALON24»

Acting as an Authorized representative of
the Manufacturer
FRESCO INTERNATIONAL 2005, S.A., SPAIN

Director of
LLC «VSALON24»

/ **Падолка С.Н. / Mr. Padolka Sergey**

Дата / Date: «28» апреля / April 2025 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
медицинского изделия /
INSTRUCTION FOR USE
for the medical device

Изделие ортопедическое для разгрузки и/или снятия давления
FRESCO нестерильное

Orthopedic product for unloading and/or pressure relief
FRESCO non-sterile

производства компании **FRESCO INTERNATIONAL 2005, S.A. (ФРЕСКО ИНТЕРНЕЙШНЛ 2005, С.А.), Испания** / manufactured by the company **FRESCO INTERNATIONAL 2005, S.A., SPAIN**

СОДЕРЖАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.....	3
СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕ (ИЗГОТОВИТЕЛЕ)	8
СВЕДЕНИЯ О МЕСТАХ ПРОИЗВОДСТВА	8
СВЕДЕНИЯ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (ИЗГОТОВИТЕЛЯ) ...	8
НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.....	8
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	8
ИНФОРМАЦИЮ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЯХ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	8
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	8
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	10
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.....	10
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	10
ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ.....	11
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	11
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ.....	17
КОМПЛЕКТНОСТЬ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	23
СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ.....	28
СВЕДЕНИЯ О МАРКИРОВКЕ.....	29
УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ	30
СРОК ГОДНОСТИ	30
СВЕДЕНИЯ О СТЕРИЛЬНОСТИ.....	30
ОПИСАНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ИЛИ ИЗДЕЛИЙ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ МЕДИЦИНСКИМИ, НО ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОМБИНАЦИИ С МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ.....	30
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ДЕЗИНФЕКЦИИ И ОЧИСТКИ	30
ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ	30
СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ.....	30
ПЕРЕЧЕНЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ, КОТОРЫМ СООТВЕТСТВУЕТ МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ.....	31
ГАРАНТИЯ.....	31
РЕКЛАМАЦИИ	31

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Изделие ортопедическое для разгрузки и/или снятия давления FRESCO нестерильное,

I. Варианты исполнения:

1. Пластырь-разгрузка MOLESKIN FRESCO в рулонах, варианты исполнения:
 - 1.1. Пластырь-разгрузка MOLESKIN FRESCO в рулонах, на хлопковой основе, бежевый, (длина 3000 мм, ширина 250 мм, толщина 0,5 мм) – 1 шт. в потребительской упаковке;
 - 1.2. Пластырь-разгрузка MOLESKIN FRESCO в рулонах, на хлопковой основе, бежевый, (длина 2500 мм, ширина 250 мм, толщина 0,5 мм) – 1 шт. в потребительской упаковке;
 - 1.3. Пластырь-разгрузка MOLESKIN FRESCO в рулонах, на хлопковой основе, розовый, (длина 2500 мм, ширина 250 мм, толщина 0,5 мм) – 1 шт. в потребительской упаковке;
 - 1.4. Пластырь-разгрузка MOLESKIN FRESCO в рулонах, на хлопковой основе, розовый, (длина 3000 мм, ширина 250 мм, толщина 0,5 мм) – 1 шт. в потребительской упаковке.
2. Пластырь-разгрузка ADHESIVE SEMI-HARD FELT в листах/рулонах, варианты исполнения:
 - 2.1. Пластырь-разгрузка ADHESIVE SEMI-HARD FELT в листах, на войлочной основе, белый (длина 300 мм, ширина 200 мм, толщина 2 мм) – 1 / 10 шт. в потребительской упаковке;
 - 2.2. Пластырь-разгрузка ADHESIVE SEMI-HARD FELT в листах, на войлочной основе, белый (длина 300 мм, ширина 200 мм, толщина 3 мм) – 1 / 6 шт. в потребительской упаковке;
 - 2.3. Пластырь-разгрузка ADHESIVE SEMI-HARD FELT в листах, на войлочной основе, белый (длина 300 мм, ширина 200 мм, толщина 4 мм) – 1 / 6 шт. в потребительской упаковке;
 - 2.4. Пластырь-разгрузка ADHESIVE SEMI-HARD FELT в листах, на войлочной основе, белый (длина 300 мм, ширина 200 мм, толщина 5 мм) – 1 / 4 шт. в потребительской упаковке;
 - 2.5. Пластырь-разгрузка ADHESIVE SEMI-HARD FELT в листах, на войлочной основе, белый (длина 300 мм, ширина 200 мм, толщина 6 мм) – 1 / 4 шт. в потребительской упаковке;
 - 2.6. Пластырь-разгрузка ADHESIVE SEMI-HARD FELT в листах, на войлочной основе, белый (длина 300 мм, ширина 200 мм, толщина 8 мм) – 1 / 3 шт. в потребительской упаковке;
 - 2.7. Пластырь-разгрузка ADHESIVE SEMI-HARD FELT в листах, на войлочной основе, белый (длина 300 мм, ширина 200 мм, толщина 10 мм) – 1 / 2 шт. в потребительской упаковке;
 - 2.8. Пластырь-разгрузка ADHESIVE SEMI-HARD FELT в листах, на войлочной основе, белый (длина 225 мм, ширина 450 мм, толщина 2 мм) – 1 / 4 шт. в потребительской упаковке;
 - 2.9. Пластырь-разгрузка ADHESIVE SEMI-HARD FELT в листах, на войлочной основе, белый (длина 225 мм, ширина 450 мм, толщина 3 мм) – 1 / 4 шт. в потребительской упаковке;
 - 2.10. Пластырь-разгрузка ADHESIVE SEMI-HARD FELT в листах, на войлочной основе, белый (длина 225 мм, ширина 450 мм, толщина 5 мм) – 1 / 4 шт. в потребительской упаковке;
 - 2.11. Пластырь-разгрузка ADHESIVE SEMI-HARD FELT в листах, на войлочной основе, белый (длина 225 мм, ширина 450 мм, толщина 7 мм) – 1 / 4 шт. в потребительской упаковке;

- 2.12. Пластырь-разгрузка ADHESIVE SEMI-HARD FELT в листах, на войлочной основе, белый (длина 225 мм, ширина 450 мм, толщина 8 мм) – 1 / 4 шт. в потребительской упаковке;
- 2.13. Пластырь-разгрузка ADHESIVE SEMI-HARD FELT в листах, на войлочной основе, белый (длина 225 мм, ширина 450 мм, толщина 10 мм) – 1 / 4 шт. в потребительской упаковке;
- 2.14. Пластырь-разгрузка ADHESIVE SEMI-HARD FELT в рулонах, на войлочной основе, белый (длина 1000 мм, ширина 300 мм, толщина 2 мм) – 1 шт. в потребительской упаковке;
- 2.15. Пластырь-разгрузка ADHESIVE SEMI-HARD FELT в рулонах, на войлочной основе, белый (длина 1000 мм, ширина 300 мм, толщина 3 мм) – 1 шт. в потребительской упаковке;
- 2.16. Пластырь-разгрузка ADHESIVE SEMI-HARD FELT в рулонах, на войлочной основе, белый (длина 1000 мм, ширина 300 мм, толщина 4 мм) – 1 шт. в потребительской упаковке;
- 2.17. Пластырь-разгрузка ADHESIVE SEMI-HARD FELT в рулонах, на войлочной основе, белый (длина 1000 мм, ширина 300 мм, толщина 5 мм) – 1 шт. в потребительской упаковке;
- 2.18. Пластырь-разгрузка ADHESIVE SEMI-HARD FELT в рулонах, на войлочной основе, белый (длина 1000 мм, ширина 300 мм, толщина 6 мм) – 1 шт. в потребительской упаковке;
- 2.19. Пластырь-разгрузка ADHESIVE SEMI-HARD FELT в рулонах, на войлочной основе, белый (длина 1000 мм, ширина 300 мм, толщина 8 мм) – 1 шт. в потребительской упаковке;
- 2.20. Пластырь-разгрузка ADHESIVE SEMI-HARD FELT в рулонах, на войлочной основе, белый (длина 1000 мм, ширина 300 мм, толщина 10 мм) – 1 шт. в потребительской упаковке;
3. Пластырь-разгрузка VELVET MOLESKIN в листах, варианты исполнения:
 - 3.1. Пластырь-разгрузка VELVET MOLESKIN в листах, на хлопковой основе, розовый (длина 300 мм, ширина 200 мм, толщина 1,9 мм) – 1 / 5 / 15 шт. в потребительской упаковке;
 - 3.2. Пластырь-разгрузка VELVET MOLESKIN в листах, на хлопковой основе, розовый (длина 225 мм, ширина 400 мм, толщина 1,9 мм) – 1 / 4 шт. в потребительской упаковке;
4. Пластырь-разгрузка MOLESKIN FRESCO SPORT в листах, варианты исполнения:
 - 4.1. Пластырь-разгрузка MOLESKIN FRESCO SPORT в листах, на хлопковой основе, розовый (длина 300 мм, ширина 200 мм, толщина 1,5 мм) – 1 / 5 / 15 шт. в потребительской упаковке;
 - 4.2. Пластырь-разгрузка MOLESKIN FRESCO SPORT в листах, на хлопковой основе, розовый (длина 400 мм, ширина 225 мм, толщина 1,5 мм) – 1 / 4 шт. в потребительской упаковке;
5. Пластырь-разгрузка MOLESKIN FLEECY WEB в листах, варианты исполнения:
 - 5.1. Пластырь-разгрузка MOLESKIN FLEECY WEB в листах, на хлопковой основе, бежевый (длина 400 мм, ширина 225 мм, толщина 2 мм) – 1 / 4 шт. в потребительской упаковке;
 - 5.2. Пластырь-разгрузка MOLESKIN FLEECY WEB в листах, на хлопковой основе, розовый (длина 400 мм, ширина 225 мм, толщина 2 мм) – 1 / 4 шт. в потребительской упаковке;

6. Пластырь-разгрузка FRESCO ALIVIO VISCO FIX в листах, варианты исполнения:
- 6.1. Пластырь-разгрузка FRESCO ALIVIO VISCO FIX в листах, на пенополиуретановой основе, розовый (длина 300 мм, ширина 200 мм, толщина 10 мм) – 1 / 2 шт. в потребительской упаковке;
- 6.2. Пластырь-разгрузка FRESCO ALIVIO VISCO FIX в листах, на пенополиуретановой основе, розовый (длина 300 мм, ширина 200 мм, толщина 25 мм) – 1 шт. в потребительской упаковке;
7. Пластырь-разгрузка ADHESIVE SEMI-HARD FELT в больших рулонах, варианты исполнения:
- 7.1. Пластырь-разгрузка ADHESIVE SEMI-HARD FELT в больших рулонах, на войлочной основе, белый (длина 3000 мм, ширина 100 мм, толщина 4 мм) – 1 шт. в потребительской упаковке;
- 7.2. Пластырь-разгрузка ADHESIVE SEMI-HARD FELT в больших рулонах, на войлочной основе, белый (длина 3000 мм, ширина 100 мм, толщина 6 мм) – 1 шт. в потребительской упаковке;
- 7.3. Пластырь-разгрузка ADHESIVE SEMI-HARD FELT в больших рулонах, на войлочной основе, белый (длина 2000 мм, ширина 100 мм, толщина 8 мм) – 1 шт. в потребительской упаковке;
- 7.4. Пластырь-разгрузка ADHESIVE SEMI-HARD FELT в больших рулонах, на войлочной основе, белый (длина 2000 мм, ширина 100 мм, толщина 10 мм) – 1 шт. в потребительской упаковке;
8. Пластырь-разгрузка в форме овала, варианты исполнения:
- 8.1. Пластырь-разгрузка в форме овала OVAL FELT PADS, на войлочной основе, белый, размер S (длина 27 мм, ширина 20 мм, толщина 2 мм) – 36 / 135 / 540 шт. в потребительской упаковке;
- 8.2. Пластырь-разгрузка в форме овала ADHESIVE SEMI-HARD FELT PADS, на войлочной основе, белый, размер S (длина 27 мм, ширина 20 мм, толщина 2 мм) – 135 / 540 шт. в потребительской упаковке;
- 8.3. Пластырь-разгрузка в форме овала OVAL FELT PADS, на войлочной основе, белый, размер L (длина 45 мм, ширина 34 мм, толщина 2 мм) – 36 / 54 / 216 шт. в потребительской упаковке;
- 8.4. Пластырь-разгрузка в форме овала ADHESIVE SEMI-HARD FELT PADS, на войлочной основе, белый, размер L (длина 45 мм, ширина 34 мм, толщина 2 мм) – 54 / 216 шт. в потребительской упаковке;
- 8.5. Пластырь-разгрузка в форме овала CORN CUSHIONS, на двухслойной пенолатексной основе, розовый-бежевый (длина 27 мм, ширина 20 мм, толщина 3 мм) – 9 / 36 / 135 шт. в потребительской упаковке;
- 8.6. Пластырь-разгрузка в форме овала BUNION CUSHIONS, на двухслойной пенолатексной основе, розовый-бежевый (длина 45 мм, ширина 34 мм, толщина 3 мм) – 4 / 54 шт. в потребительской упаковке;
9. Пластырь-разгрузка в форме круга, варианты исполнения:
- 9.1. Пластырь-разгрузка в форме круга ROUND FELT PADS, на войлочной основе, белый, размер S (внешний диаметр 23 мм, внутренний диаметр 8 мм, толщина 2 мм) – 36 / 153 / 612 шт. в потребительской упаковке;

- 9.2. Пластырь-разгрузка в форме круга ADHESIVE SEMI-HARD FELT PADS, на войлочной основе, белый, размер S (внешний диаметр 23 мм, внутренний диаметр 8 мм, толщина 2 мм) – 153 / 612 шт. в потребительской упаковке;
- 9.3. Пластырь-разгрузка в форме круга ROUND FELT PADS, на войлочной основе, белый, размер L (внешний диаметр 35 мм, внутренний диаметр 15 мм, толщина 2 мм) – 36 / 66 / 264 шт. в потребительской упаковке;
- 9.4. Пластырь-разгрузка в форме круга ADHESIVE SEMI-HARD FELT PADS, на войлочной основе, белый, размер L (внешний диаметр 35 мм, внутренний диаметр 15 мм, толщина 2 мм) – 66 / 264 шт. в потребительской упаковке;
- 9.5. Пластырь-разгрузка в форме круга ROUND CUSHIONS, на двухслойной пенолатексной основе, розовый-бежевый, размер S (внешний диаметр 23 мм, внутренний диаметр 8 мм, толщина 3 мм) – 9 / 36 / 153 шт. в потребительской упаковке;
- 9.6. Пластырь-разгрузка в форме круга ROUND CUSHIONS, на двухслойной пенолатексной основе, розовый-бежевый, размер L (внешний диаметр 35 мм, внутренний диаметр 15 мм, толщина 3 мм) – 4 / 66 шт. в потребительской упаковке;
10. Пластырь-разгрузка в форме «почки», варианты исполнения:
 - 10.1. Пластырь-разгрузка в форме «почки» KIDNEY FELT PADS, на войлочной основе, белый, размер M (длина 72 мм, ширина 40 мм, толщина 2 мм) – 36 / 30 / 120 шт. в потребительской упаковке;
 - 10.2. Пластырь-разгрузка в форме «почки» ADHESIVE SEMI-HARD FELT PADS, на войлочной основе, белый, размер M (длина 72 мм, ширина 40 мм, толщина 2 мм) – 30 / 120 шт. в потребительской упаковке;
 - 10.3. Пластырь-разгрузка в форме «почки» KIDNEY FELT PADS, на войлочной основе, белый, размер L (длина 90 мм, ширина 50 мм, толщина 2 мм) – 36 / 16 / 64 шт. в потребительской упаковке;
 - 10.4. Пластырь-разгрузка в форме «почки» ADHESIVE SEMI-HARD FELT PADS, на войлочной основе, белый, размер L (длина 90 мм, ширина 50 мм, толщина 2 мм) – 16 / 64 шт. в потребительской упаковке;
 - 10.5. Пластырь-разгрузка в форме «почки» KIDNEY FLEECY WEB PADS, на хлопковой основе, розовый, размер M (длина 72 мм, ширина 40 мм, толщина 2 мм) – 36 / 30 / 120 шт. в потребительской упаковке;
 - 10.6. Пластырь-разгрузка в форме «почки» MOLESKIN FLEECY WEB PADS, на хлопковой основе, розовый, размер M (длина 72 мм, ширина 40 мм, толщина 2 мм) – 30 / 120 шт. в потребительской упаковке;
 - 10.7. Пластырь-разгрузка в форме «почки» KIDNEY FLEECY WEB PADS, на хлопковой основе, розовый, размер L (длина 90 мм, ширина 50 мм, толщина 2 мм) – 36 / 16 / 64 шт. в потребительской упаковке;
 - 10.8. Пластырь-разгрузка в форме «почки» MOLESKIN FLEECY WEB PADS, на хлопковой основе, розовый, размер L (длина 90 мм, ширина 50 мм, толщина 2 мм) – 16 / 64 шт. в потребительской упаковке;
 - 10.9. Пластырь-разгрузка в форме «почки» CALLUS & HEEL CUSHIONS, на двухслойной пенолатексной основе, розовый-бежевый (длина 72 мм, ширина 43 мм, толщина 3 мм) – 2 / 30 шт. в потребительской упаковке;
11. Пластырь-разгрузка в форме подковы, варианты исполнения:
 - 11.1. Пластырь-разгрузка в форме подковы HORSESHOE FELT PADS, на войлочной основе, белый, размер S (длина 27 мм, ширина 20 мм, толщина 2 мм) – 36 / 150 / 600 шт. в потребительской упаковке;

- 11.2. Пластырь-разгрузка в форме подковы ADHESIVE SEMI-HARD FELT PADS, на войлочной основе, белый, размер S (длина 27 мм, ширина 20 мм, толщина 2 мм) – 150 / 600 шт. в потребительской упаковке;
- 11.3. Пластырь-разгрузка в форме подковы HORSESHOE FELT PADS, на войлочной основе, белый, размер L (длина 44 мм, ширина 50 мм, толщина 2 мм) – 36 / 144 шт. в потребительской упаковке;
- 11.4. Пластырь-разгрузка в форме подковы ADHESIVE SEMI-HARD FELT PADS, на войлочной основе, белый, размер L (длина 44 мм, ширина 50 мм, толщина 2 мм) – 144 шт. в потребительской упаковке;

- 12. Трубочка-разгрузка для пальцев TUBIFOAM, варианты исполнения:
 - 12.1. Трубочка-разгрузка для пальцев TUBIFOAM на хлопково-пенополиуретановой основе, телесная, размер S (длина 250 мм, диаметр 12 мм) – 1 / 6 / 12 шт. в потребительской упаковке;
 - 12.2. Трубочка-разгрузка для пальцев TUBIFOAM на хлопково-пенополиуретановой основе, телесная, размер M (длина 250 мм, диаметр 15 мм) – 1 / 6 / 12 шт. в потребительской упаковке;
 - 12.3. Трубочка-разгрузка для пальцев TUBIFOAM на хлопково-пенополиуретановой основе, телесная, размер L (длина 250 мм, диаметр 18 мм) – 1 / 6 / 12 шт. в потребительской упаковке;
 - 12.4. Трубочка-разгрузка для пальцев TUBIFOAM на хлопково-пенополиуретановой основе, телесная, размер XL (длина 250 мм, диаметр 25 мм) – 1 / 6 / 12 шт. в потребительской упаковке;

- 13. Полотно-разгрузка GEL SHEET WITH FABRIC в листах, варианты исполнения:
 - 13.1. Полотно-разгрузка GEL SHEET WITH FABRIC в листах, на гелевой основе, одностороннее (длина 150 мм, ширина 200 мм, толщина 1 мм) – 1 шт. в потребительской упаковке;
 - 13.2. Полотно-разгрузка GEL SHEET WITH FABRIC в листах, на гелевой основе, одностороннее (длина 150 мм, ширина 200 мм, толщина 2 мм) – 1 шт. в потребительской упаковке;
 - 13.3. Полотно-разгрузка GEL SHEET WITH FABRIC в листах, на гелевой основе, одностороннее (длина 100 мм, ширина 100 мм, толщина 2 мм) – 1 шт. в потребительской упаковке;
 - 13.4. Полотно-разгрузка GEL SHEET WITH FABRIC в листах, на гелевой основе, двустороннее (длина 150 мм, ширина 200 мм, толщина 2 мм) – 1 шт. в потребительской упаковке.

II. Эксплуатационная документация:

Инструкция по применению на бумажном носителе – 1 шт. на транспортную тару и в электронном виде по ссылке на русской маркировке потребительской упаковки.

ПРИМЕЧАНИЕ: наименование медицинского изделия может быть упомянуто в эксплуатационной документации в сокращенной форме для удобства восприятия информации, а также могут встречаться такие термины, как изделие, медицинское изделие, МИ, изделие медицинское, продукт, продукция, изделие для снятия давления, изделие для разгрузки.

СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕ (ИЗГОТОВИТЕЛЕ)

FRESCO INTERNATIONAL 2005, S.A. (ФРЕСКО ИНТЕРНЕЙШНЛ 2005, С.А.)
CALLE TORRE DE CELLERS 5 - 08150 PARETS DEL VALLES (BARCELONA) SPAIN
(Испания)

СВЕДЕНИЯ О МЕСТАХ ПРОИЗВОДСТВА

FRESCO INTERNATIONAL 2005, S.A. (ФРЕСКО ИНТЕРНЕЙШНЛ 2005, С.А.), CALLE
TORRE DE CELLERS 5 - 08150 PARETS DEL VALLES (BARCELONA) SPAIN (Испания)

СВЕДЕНИЯ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (ИЗГОТОВИТЕЛЯ)

Общество с ограниченной ответственностью «ВСАЛОН24» (ООО «ВСАЛОН24»)
Россия, 644099, Омская область, г.о. город Омск, г. Омск, ул. Гагарина, д. 14, офис 4,5

НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Предназначено для использования на неповрежденной коже для защиты болезненных областей стопы и тела от натирания и давления, предотвращения контакта поврежденной области с какой-либо поверхностью, перераспределения давления от поврежденной области на другие здоровые части стопы и тела, для смягчения боли и способствования заживлению повреждений, а также для использования в качестве подложки и для профилактики пролежней.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ортопедия. Изделия применяются для оказания медицинской помощи в лечебно-профилактических и клинических учреждениях различного профиля, а также для домашнего применения лицами, прошедшими медицинское обучение, и лицами без специального образования.

ИНФОРМАЦИЮ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЯХ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Все группы пациентов/потребителей без возрастных и других ограничений.

- Лица, которым требуется защита областей стоп и тела, подверженных натиранию и воздействию давления.
- Любые лица, у которых есть риск повреждения кожи от давления и натирания.
- Любое лицо, у которого развилась язва (повреждение на коже) или которое подвержено риску ее развития, вызванному чрезмерным давлением, как пиковым, так и длительным по времени.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Пластыри-разгрузки в рулонах / листах на хлопковой основе (MOLESKIN FRESCO, VELVET MOLESKIN, MOLESKIN FRESCO SPORT, MOLESKIN FLEECY WEB) имеют следующие показания к применению:

- защита болезненных областей стопы от натирания и давления.

Пластыри-разгрузки ADHESIVE SEMI-HARD FELT в листах / рулонах / больших рулонах на войлочной основе и Пластыри-разгрузки FRESCO ALIVIO VISCO FIX в листах на пенополиуретановой основе имеют следующие показания к применению:

- снятия давления при нейропатических и нейроишемических язвах;

- предотвращение взаимодействия и контакта язвы (повреждения) с какой-либо поверхностью;
- перераспределение давления от области раны (повреждения) на другие здоровые части стопы или тела, чтобы замедлить ее прогрессирование;
- дополнение к обычному лечению язвы (повреждения);
- использование в качестве подкладки внутри гипсовых повязок.

Пластыри-разгрузки в форме овала / круга / «почки» / подковы имеют следующие показания к применению:

- смягчение боли;
- защита и способствование заживлению мозолей, затвердений, натертых участков кожи, волдырей и шишек:
 - Пластыри-разгрузки в форме овала OVAL FELT PADS / ADHESIVE SEMI-HARD FELT PADS на войлочной основе, размер S и Пластыри-разгрузки в форме овала CORN CUSHIONS, на двухслойной пенолатексной основе рекомендуется использовать при наличии мозолей;
 - Пластыри-разгрузки в форме круга ROUND FELT PADS / ADHESIVE SEMI-HARD FELT PADS на войлочной основе, размер S и Пластыри-разгрузки в форме круга ROUND CUSHIONS, на двухслойной пенолатексной основе, размер S, также рекомендуется использовать при наличии мозолей;
 - Пластыри-разгрузки в форме овала OVAL FELT PADS / ADHESIVE SEMI-HARD FELT PADS на войлочной основе, размер L и Пластыри-разгрузки в форме овала BUNION CUSHIONS, на двухслойной пенолатексной основе рекомендуется использовать при наличии подагрических шишек;
 - Пластыри-разгрузки в форме круга ROUND FELT PADS / ADHESIVE SEMI-HARD FELT PADS на войлочной основе, размер L и Пластыри-разгрузки в форме круга ROUND CUSHIONS, на двухслойной пенолатексной основе, размер L, также рекомендуется использовать при наличии подагрических шишек;
 - Пластыри-разгрузки в форме «почки» рекомендуется использовать для наложения на головку плюсневой кости стопы или шишку (нарост) на пальце. Также Пластыри-разгрузки в форме «почки» CALLUS & HEEL CUSHIONS можно использовать для защиты пяточной области;
 - Пластыри-разгрузки в форме подковы HORSESHOE FELT PADS / ADHESIVE SEMI-HARD FELT, размер S рекомендуется использовать для наложения на пальцы стопы, шишки (наросты);
 - Пластыри-разгрузки в форме подковы HORSESHOE FELT PADS / ADHESIVE SEMI-HARD FELT, размер L рекомендуется использовать для защиты головки плюсневой кости;
- уменьшение давления и дискомфорта, вызванных трением обуви.

Трубочки-разгрузки для пальцев TUBIFOAM имеют следующие показания к применению:

- для защиты пальцев ступней и рук;
- уменьшение трения между пальцами, натоптышами и мозолями на коже.

Полотна-разгрузки GEL SHEET WITH FABRIC в листах имеют следующие показания к применению:

- предотвращение повреждений, связанных с трением и давлением (для использования на неповрежденной коже);
- может использоваться при язвах (повреждениях) 1-й степени на неповрежденной коже;
- использование на участках с хрупкой / сухой кожей, подверженной риску повреждения;
- использование в качестве подложки;
- профилактика пролежней при использовании каких-либо медицинских устройств.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- Лица, страдающие от диабета и проблем с кровообращением, должны обратиться за профессиональной врачебной консультацией.
- Применение пластырей-разгрузок при ишемических язвах (повреждениях) является неэффективным, поскольку они вызваны не воздействием давления. Лечащий врач должен определить правильную этиологию язвы (повреждения). Если трение и давление не являются факторами ее развития, то использование пластыря-разгрузки будет бесполезным.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Для использования только на неповрежденной коже, не применять на открытых или мокнущих ранах (повреждениях);
- Только для наружного применения;
- Для использования только одним пациентом;
- Не используйте более 16 часов в день;
- Регулярно осматривайте кожу;
- Прекратите использование и обратитесь за консультацией к врачу в следующих обстоятельствах:
 - Происходит утрата целостности кожи, т.е. ее повреждение;
 - Подтверждение глубокого повреждения тканей или подозрение на такое повреждение;
 - Присутствует любой вид раздражения кожи;
 - Появляется потница (сыпь) или покраснение кожи.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед использованием убедитесь, что кожа является полностью сухой;
- Храните в недоступном для детей месте;
- Лица, страдающие от диабета или плохого кровообращения, должны обратиться за профессиональной врачебной консультацией;
- Очистите теплой водой, если после удаления изделия на коже есть остатки клеевого слоя.
- Не перекрывайте дыхательные пути;
- Не наносите на слизистые оболочки;
- Не подвергайте воздействию солнечных лучей;
- Полотна-разгрузки на гелевой основе содержат высококачественное медицинское минеральное масло, которое может просачиваться на впитывающие поверхности. Защищайте ткани, которые окрашиваются;

- Не накрывайте язву пластырем-разгрузкой на войлочной основе. Кроме того, необходимо избегать покрытия пальцев, если только не имеются какие-либо явные биомеханические причины для таких действий;
- Убедитесь, что пластырь-разгрузка на войлочной основе, расположенный на подошвенной стороне стопы, имеет достаточную толщину, чтобы снять давление на область раны и предотвратить контакт язвы (повреждения) с поверхностью соприкосновения. Для достижения данной цели:
 - Толщина пластыря-разгрузки на войлочной основе зависит от веса пациента. Обычно используется вариант исполнения толщиной не менее 8 мм. Варианты исполнения толщиной 4 и 6 мм в основном используются в качестве вторых слоев в целях дополнительной разгрузки;
 - Можно получить любую толщину изделия путем наложения нескольких слоев в зависимости от величины давления, которое необходимо устранить.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Не выявлены. В очень редких случаях могут наблюдаться аллергические реакции и раздражения, вызванные индивидуальной непереносимостью материалов медицинского изделия.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1. Пластырь-разгрузка MOLESKIN FRESCO в рулонах:

Медицинское изделие «Пластырь-разгрузка MOLESKIN FRESCO» представляет собой рулонный тонкий пластырь с рабочей поверхностью (основой), изготовленной из ворсового хлопка (бежевого или розового цвета). Материал основы плотного плетения, тонкий, неэластичный, фактически нерастяжим. И с нанесенным, с одной стороны, гипоаллергенным клеевым слоем. Сохранность свойств клеевого слоя при транспортировке и хранении изделий обеспечивает защитный слой силиконовой бумаги.

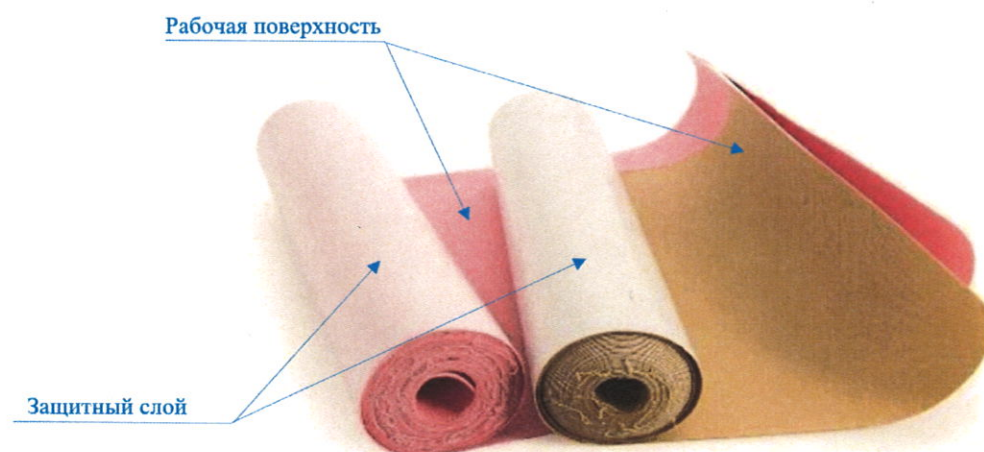


Рисунок 1. Внешний вид МИ «Пластырь-разгрузка MOLESKIN FRESCO в рулонах»

2. Пластырь-разгрузка ADHESIVE SEMI-HARD FELT в листах/рулонах:

Медицинское изделие «Пластырь-разгрузка ADHESIVE SEMI-HARD FELT» представляет собой рулонный или листовый полутвердый пластырь с рабочей поверхностью (основой) из очень гладкого войлока (белого цвета). И с нанесенным, с одной стороны,

гипоаллергенным клеевым слоем. Сохранность свойств клеевого слоя при транспортировке и хранении изделий обеспечивает защитный слой силиконовой бумаги.

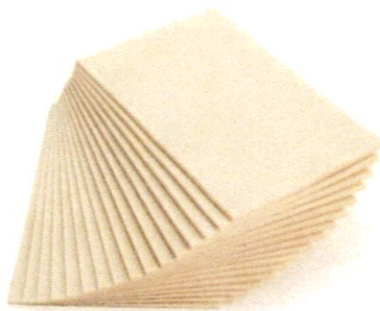


Рисунок 2. Внешний вид МИ «Пластырь-разгрузка ADHESIVE SEMI-HARD FELT в листах»



Рисунок 3. Внешний вид МИ «Пластырь-разгрузка ADHESIVE SEMI-HARD FELT в рулонах»

3. Пластырь-разгрузка VELVET MOLESKIN в листах:

Медицинское изделие «Пластырь-разгрузка VELVET MOLESKIN» представляет собой листовой пластырь с рабочей поверхностью (основой), изготовленной из бархатистого хлопка (розового цвета). Материал основы перкалевого плетения с подложкой из хлопчатобумажной марлевой ткани, полу-эластичен. И с нанесенным, с одной стороны, гипоаллергенным клеевым слоем. Сохранность свойств клеевого слоя при транспортировке и хранении изделий обеспечивает защитный слой силиконовой бумаги.



Рисунок 4. Внешний вид МИ «Пластырь-разгрузка VELVET MOLESKIN в листах»

4. Пластырь-разгрузка MOLESKIN FRESCO SPORT в листах:

Медицинское изделие «Пластырь-разгрузка MOLESKIN FRESCO SPORT» представляет собой листовой тонкий пластырь с рабочей поверхностью (основой), изготовленной из бархатистого хлопка (розового цвета). Материал основы эластичного плетения, имеет

небольшую растяжимость. И с нанесенным, с одной стороны, гипоаллергенным клеевым слоем. Сохранность свойств клеевого слоя при транспортировке и хранении изделий обеспечивает защитный слой силиконовой бумаги.

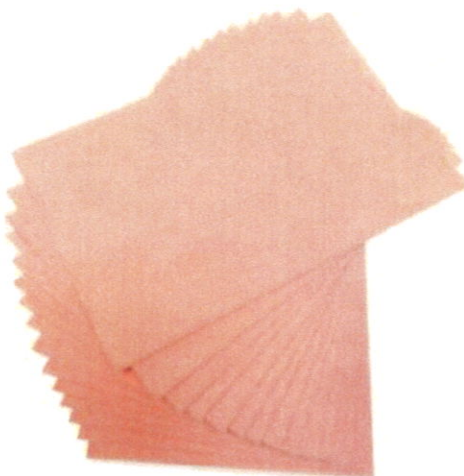


Рисунок 5. Внешний вид МИ «Пластырь-разгрузка MOLESKIN FRESCO SPORT в листах»

5. Пластырь-разгрузка MOLESKIN FLEECY WEB в листах:

Медицинское изделие «Пластырь-разгрузка MOLESKIN FRESCO SPORT» представляет собой листовой пластырь с рабочей поверхностью (основой), изготовленной из бархатистого хлопка (бежевого или розового цвета). Материал основы полу-эластичен и имеет ворсистость, за счет чего является более плотным. И с нанесенным, с одной стороны, гипоаллергенным клеевым слоем. Сохранность свойств клеевого слоя при транспортировке и хранении изделий обеспечивает защитный слой силиконовой бумаги.



Рисунок 6. Внешний вид МИ «Пластырь-разгрузка MOLESKIN FLEECY WEB в листах»

6. Пластырь-разгрузка FRESCO ALIVIO VISCO FIX в листах:

Медицинское изделие «Пластырь-разгрузка FRESCO ALIVIO VISCO FIX» представляет собой листовой пластырь с рабочей поверхностью (основой) из эластичного пенополиуретана (розового цвета) с вязкоупругим эффектом. И с нанесенным, с одной стороны, гипоаллергенным клеевым слоем. Сохранность свойств клеевого слоя при транспортировке и хранении изделий обеспечивает защитный слой силиконовой бумаги.



Рисунок 7. Внешний вид МИ «FRESCO ALIVIO VISCO FIX в листах»

7. Пластырь-разгрузка ADHESIVE SEMI-HARD FELT в больших рулонах:

Медицинское изделие «Пластырь-разгрузка ADHESIVE SEMI-HARD FELT» представляет собой рулонный полутвердый пластырь с рабочей поверхностью (основой) из очень гладкого войлока (белого цвета). И с нанесенным, с одной стороны, гипоаллергенным клеевым слоем. Сохранность свойств клеевого слоя при транспортировке и хранении изделий обеспечивает защитный слой силиконовой бумаги.



Рисунок 8. Внешний вид МИ «Пластырь-разгрузка ADHESIVE SEMI-HARD FELT в больших рулонах»

8. Пластырь-разгрузка в форме овала:

Медицинское изделие «Пластырь-разгрузка в форме овала» представляет собой пластырь в виде овала с основой из войлока или двухслойного пенолатекса. И с нанесенным, с одной стороны, гипоаллергенным клеевым слоем. Изделия поставляются расположенными на листах из силиконовой бумаги, что обеспечивает сохранность свойств клеевого слоя при транспортировке и хранении.

			
Пластырь-разгрузка в форме овала CORN CUSHIONS, на двухслойной пенолатексной основе, розовый-бежевый	Пластырь-разгрузка в форме овала OVAL FELT PADS / ADHESIVE SEMI-HARD FELT PADS, на войлочной основе, белый, размер S	Пластырь-разгрузка в форме овала BUNION CUSHIONS, на двухслойной пенолатексной основе, розовый-бежевый	Пластырь-разгрузка в форме овала OVAL FELT PADS / ADHESIVE SEMI-HARD FELT PADS, на войлочной основе, белый, размер L

Рисунок 9. Внешний вид вариантов исполнения МИ «Пластырь-разгрузка в форме овала»

9. Пластырь-разгрузка в форме круга:

Медицинское изделие «Пластырь-разгрузка в форме круга» представляет собой пластырь круглой формы с основой из войлока или двухслойного пенолатекса. И с нанесенным, с одной стороны, гипоаллергенным клеевым слоем. Изделия поставляются расположенными на листах из силиконовой бумаги, что обеспечивает сохранность свойств клеевого слоя при транспортировке и хранении.

	
Пластырь-разгрузка в форме круга ROUND FELT PADS / ADHESIVE SEMI-HARD FELT PADS, на войлочной основе, белый	Пластырь-разгрузка в форме круга ROUND CUSHIONS, на двухслойной пенолатексной основе, розовый-бежевый

Рисунок 10. Внешний вид вариантов исполнения МИ «Пластырь-разгрузка ROUND на листах»

10. Пластырь-разгрузка в форме «почки»:

Медицинское изделие «Пластырь-разгрузка в форме «почки»» представляет собой пластырь в форме «почки» с основой из войлока, хлопка или двухслойного пенолатекса. И с нанесенным, с одной стороны, гипоаллергенным клеевым слоем. Изделия поставляются расположенными на листах из силиконовой бумаги, что обеспечивает сохранность свойств клеевого слоя при транспортировке и хранении.

		
Пластырь-разгрузка в форме «почки» KIDNEY FELT PADS / ADHESIVE SEMI-HARD FELT PADS, на войлочной основе, белый	Пластырь-разгрузка в форме «почки» KIDNEY FLEECY WEB PADS / MOLESKIN FLEECY WEB PADS, на хлопковой основе, розовый	Пластырь-разгрузка в форме «почки» CALLUS & HEEL CUSHIONS, на двухслойной пенолатексной основе, розовый-бежевый

Рисунок 11. Внешний вид вариантов исполнения МИ «Пластырь-разгрузка в форме «почки»»

11. Пластырь-разгрузка в форме подковы:

Медицинское изделие «Пластырь-разгрузка в форме подковы» представляет собой пластырь в форме «подковы» с основой из войлока (белого цвета). И с нанесенным, с одной стороны, гипоаллергенным клеевым слоем. Изделия поставляются расположенными на листах из силиконовой бумаги, что обеспечивает сохранность свойств клеевого слоя при транспортировке и хранении.

	
Пластырь-разгрузка в форме подковы HORSESHOE FELT PADS / ADHESIVE SEMI-HARD FELT PADS, на войлочной основе, белый, размер S	Пластырь-разгрузка в форме подковы HORSESHOE FELT PADS / ADHESIVE SEMI-HARD FELT PADS, на войлочной основе, белый, размер L

Рисунок 12. Внешний вид вариантов исполнения МИ «Пластырь-разгрузка в форме подковы»

12. Трубочка-разгрузка для пальцев TUBIFOAM:

Медицинское изделие «Трубочка-разгрузка для пальцев TUBIFOAM» представляет собой трубочку из хлопка сетчатого плетения, покрытую легким пенополиуретаном (телесного цвета).



Рисунок 13. Внешний вид МИ «Трубочка-разгрузка для пальцев TUBIFOAM»

13. Полотно-разгрузка GEL SHEET WITH FABRIC:

Медицинское изделие «Полотно-разгрузка GEL SHEET WITH FABRIC» представляет собой полотно с основой из эластичного, мягкого полимерного геля, покрытого тканью с одной или с двух сторон. Одностороннее полотно также имеет покрытие из высококачественного медицинского минерального масла со стороны полимерного геля.

	
Полотно-разгрузка GEL SHEET WITH FABRIC в листах, на гелевой основе, одностороннее	Полотно-разгрузка GEL SHEET WITH FABRIC в листах, на гелевой основе, двустороннее

Рисунок 14. Схематическое представление вариантов исполнения МИ «Полотно-разгрузка GEL SHEET WITH FABRIC»

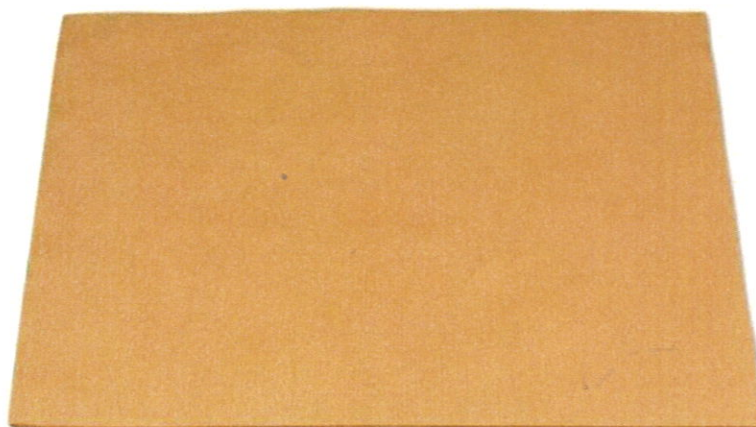


Рисунок 15. Внешний вид МИ «Полотно-разгрузка GEL SHEET WITH FABRIC»

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

1. Пластырь-разгрузка MOLESKIN FRESCO в рулонах:

Пластырь-разгрузка используется для наклеивания на неповрежденную кожу стопы или на внутреннюю поверхность обуви для амортизации и защиты от натирания или давления. Из рулона пластыря-разгрузки можно вырезать, согласно необходимости потребителя, фрагменты различных форм и размеров, поэтому данное изделие может подойти к любой форме стопы. После размещения изделие находится в непрерывном контакте с обувью или областью стопы, подверженной высокому трению во время ходьбы или оказания давления, что позволяет избежать натирания кожи.

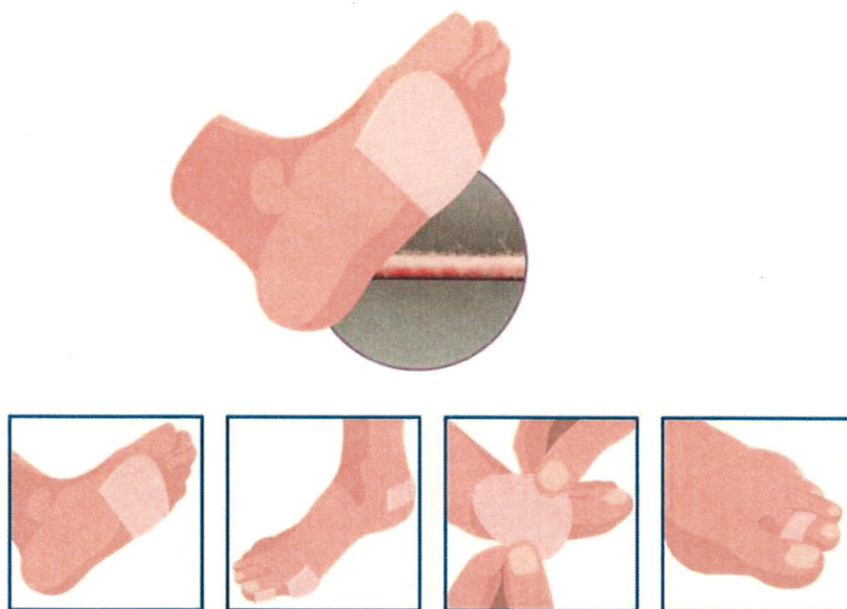


Рисунок 16. Способ применения МИ «Пластырь-разгрузка MOLESKIN FRESCO»

2. Пластырь-разгрузка ADHESIVE SEMI-HARD FELT в листах/рулонах:

Из листа/рулона пластыря-разгрузки можно вырезать, согласно необходимости потребителя, фрагменты различных форм и размеров. Данное изделие выступает в качестве опорной поверхности для облегчения заживления язв или других повреждений стоп, а также любой другой части тела с повышенным риском, особенно это применимо к выпуклым частям тела. При ходьбе или оказании дополнительного давления здоровые (неповрежденные) части стопы или тела находятся в непосредственном контакте с пластырем-разгрузкой, который предотвращает контакт или взаимодействие поврежденной области с поверхностью соприкосновения или любой другой поверхностью. Пластырь-разгрузка на войлочной основе выдерживает давление благодаря полутвердому материалу, который не подлежит деформации или сдавливанию, за счёт чего язва или повреждение остается в открытом и свободном состоянии (без оказания давления) для процесса заживления.

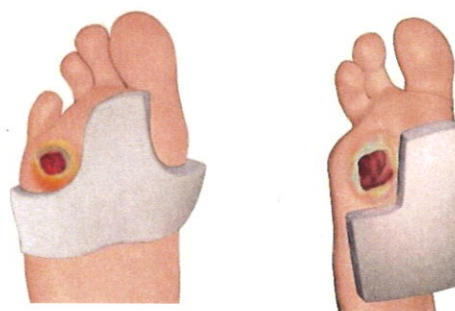


Рисунок 17. Способ применения МИ «Пластырь-разгрузка ADHESIVE SEMI-HARD FELT»

3. Пластырь-разгрузка VELVET MOLESKIN в листах:

Пластырь-разгрузка используется для наклеивания на неповрежденную кожу стопы для защиты от натирания или давления. Из листа пластыря-разгрузки можно вырезать, согласно необходимости потребителя, фрагменты различных форм и размеров, поэтому данное изделие может подойти к любой форме стопы. После размещения изделие находится в непрерывном

контакте с обувью или областью стопы, подверженной высокому трению во время ходьбы или оказания давления, что позволяет избежать натирания кожи и ускорить ее восстановление.

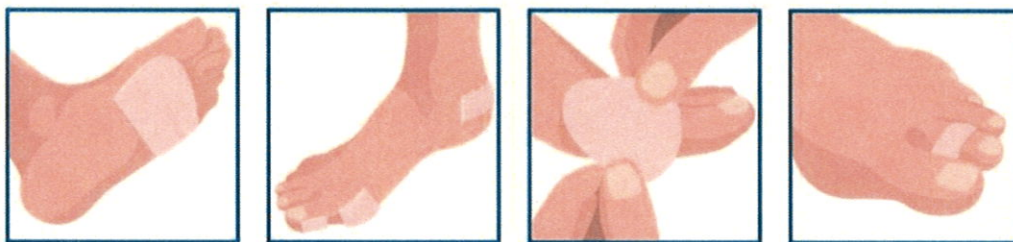


Рисунок 18. Способ применения МИ «Пластырь-разгрузка VELVET MOLESKIN»

4. Пластырь-разгрузка MOLESKIN FRESCO SPORT в листах:

Пластырь-разгрузка используется для наклеивания на неповрежденную кожу стопы или на внутреннюю поверхность обуви для амортизации и защиты от натирания или давления. Из листа пластыря-разгрузки можно вырезать, согласно необходимости потребителя, фрагменты различных форм и размеров, поэтому данное изделие может подойти к любой форме стопы. После размещения изделие находится в непрерывном контакте с обувью или областью стопы, подверженной высокому трению во время ходьбы или оказания давления, что позволяет избежать натирания кожи.

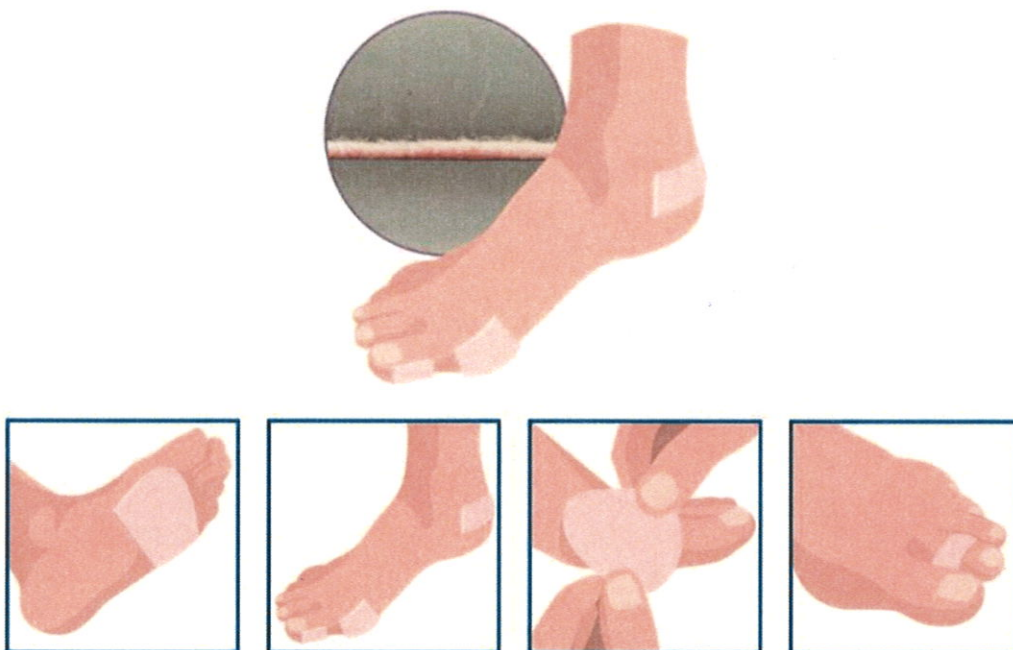


Рисунок 19. Способ применения МИ «Пластырь-разгрузка MOLESKIN FRESCO SPORT»

5. Пластырь-разгрузка MOLESKIN FLEECY WEB в листах:

Пластырь-разгрузка используется для наклеивания на неповрежденную кожу стопы или на внутреннюю поверхность обуви для амортизации и защиты от натирания или давления. Из листа пластыря-разгрузки можно вырезать, согласно необходимости потребителя, фрагменты различных форм и размеров, поэтому данное изделие может подойти к любой форме стопы. После размещения изделие находится в непрерывном контакте с обувью или областью стопы, подверженной высокому трению во время ходьбы или оказания давления, что позволяет избежать натирания кожи и ускорить ее восстановление.

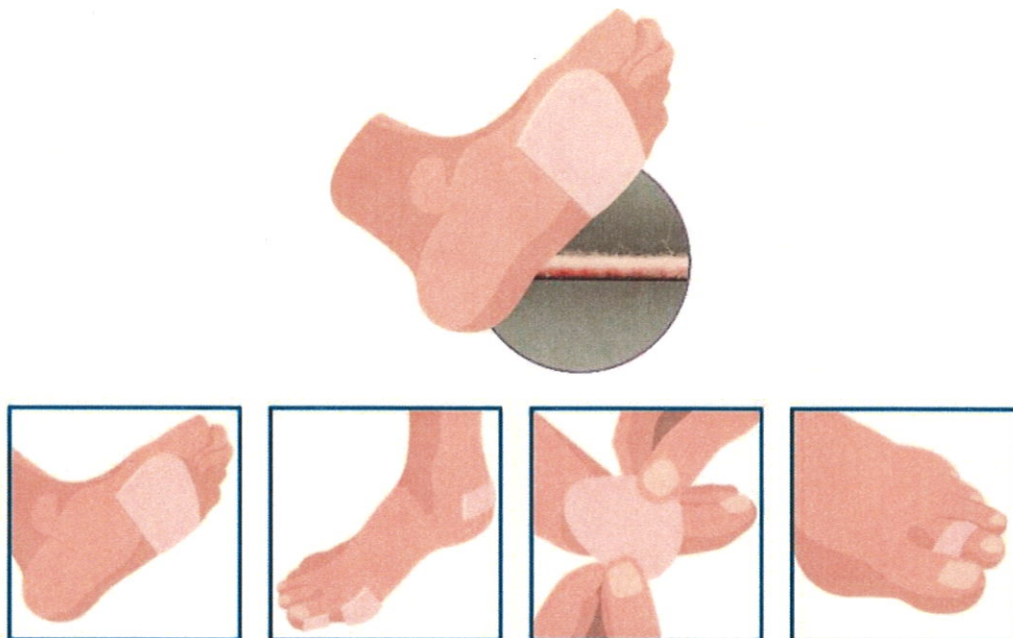


Рисунок 20. Способ применения МИ «Пластырь-разгрузка MOLESKIN FLEECY WEB»

6. Пластырь-разгрузка FRESCO ALIVIO VISCO FIX в листах:

Изделие подходит для разгрузки участков стопы и тела с высоким давлением и обеспечения защиты чувствительных или поврежденных участков кожи. Из листов пластыря-разгрузки можно вырезать, согласно необходимости потребителя, фрагменты различных форм и размеров. Изделие адаптируется по форме частей тела, чувствительно к температуре, распределяет вес, обеспечивая оптимальное положение с минимально распределенным давлением, а также возвращая форму после снятия нагрузки. Структура с открытыми порами позволяет коже нормально дышать. Пластырь-разгрузка мягкий и приятный на ощупь.

7. Пластырь-разгрузка ADHESIVE SEMI-HARD FELT в больших рулонах:

Из рулона пластыря-разгрузки можно вырезать, согласно необходимости потребителя, фрагменты различных форм и размеров. Данное изделие выступает в качестве опорной поверхности для облегчения заживления язв или других повреждений стоп, а также любой другой части тела с повышенным риском, особенно это применимо к выпуклым частям тела. При ходьбе или оказании дополнительного давления здоровые (неповрежденные) части стопы или тела находятся в непосредственном контакте с пластырем-разгрузкой, который предотвращает контакт или взаимодействие поврежденной области с поверхностью соприкосновения или любой другой поверхностью. Пластырь-разгрузка на войлочной выдерживает давление благодаря полутвердому материалу, который не подлежит деформации или сдавливанию, за счёт чего язва или повреждение остается в открытом и свободном состоянии (без оказания давления) для процесса заживления.

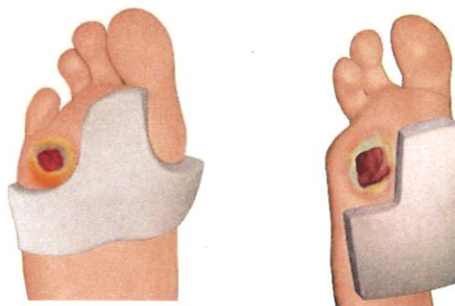


Рисунок 21. Способ применения МИ «Пластырь-разгрузка ADHESIVE SEMI-HARD FELT»

8. Пластырь-разгрузка в форме овала:

Используется для наклеивания на мозоли и шишки на пальцах ног (непосредственно на неповрежденные участки кожи). Пластырь-разгрузка смягчает боль, защищает и способствует заживлению мозолей, затвердений, натертых участков кожи, волдырей и шишек, уменьшает давление и дискомфорт, вызванный трением обуви. Пластыри-разгрузки овальной формы размеров S рекомендуются для использования при наличии мозолей, а размеры L при наличии подагрических шишек.

При ходьбе или оказании дополнительного давления здоровые части стопы находятся в непосредственном контакте с пластырем-разгрузкой, который не допускает соприкосновения поврежденной области стопы с обувью. Изделие выдерживает давление благодаря тому, что пенолатекс или войлок не деформируются и не сдавливаются, поэтому поврежденный участок оставляют в открытом и свободном состоянии (без оказания давления) для процесса заживления.



Рисунок 22. Способ применения МИ «Пластырь-разгрузка в форме овала»

9. Пластырь-разгрузка в форме круга:

Используется для наклеивания на мозоли и шишки на пальцах ног. Пластырь-разгрузка смягчает боль, защищает и способствует заживлению мозолей, затвердений, натертых участков кожи, волдырей и шишек, уменьшает давление и дискомфорт от болезненных натоптышей и косточек большого пальца стопы, вызванный трением обуви.

При ходьбе или оказании дополнительного давления здоровые части стопы находятся в непосредственном контакте с пластырем-разгрузкой, который не допускает соприкосновения поврежденной области стопы с обувью. Изделие выдерживает давление благодаря тому, что пенолатекс или войлок не деформируются и не сдавливаются, поэтому поврежденный участок

оставляют в открытом и свободном состоянии (без оказания давления) для процесса заживления.



Рисунок 23. Способ применения МИ «Пластырь-разгрузка ROUND»

10. Пластырь-разгрузка в форме «почки»:

Используется для наложения на головку плюсневой кости стопы или шишку (нарост) на пальце, а также может обеспечивать защиту пятки. Пластырь-разгрузка смягчает боль, защищает и способствует заживлению мозолей, затвердений, натертых участков кожи, волдырей и шишек, уменьшает давление и дискомфорт, вызванный трением обуви.

При ходьбе или оказании дополнительного давления здоровые части стопы находятся в непосредственном контакте с пластырем-разгрузкой, который не допускает соприкосновения поврежденной области стопы с обувью. Изделие выдерживает давление благодаря амортизации, которую обеспечивает войлок, хлопок или пенолатекс. Таким образом, участок кожи, подверженный повышенному давлению, не соприкасается с поверхностью или, если повреждение кожи уже присутствует на данном участке, может начаться процесс заживления.



Рисунок 24. Способ применения МИ «Пластырь-разгрузка в форме «почки»»

11. Пластырь-разгрузка в форме подковы:

Используется для наклеивания на мозоли и шишки на пальцах ног (непосредственно на неповрежденные участки кожи). Пластырь-разгрузка смягчает боль, защищает и способствует заживлению мозолей, затвердений, натертых участков кожи, волдырей и шишек, уменьшает давление и дискомфорт, вызванный трением обуви. Пластыри-разгрузки в форме «подковы» размеров S рекомендуются для использования при наличии шишек/наростов, а размеры L при наличии дискомфорта в области плюсневой кости.

При ходьбе или оказании дополнительного давления здоровые части стопы находятся в непосредственном контакте с пластырем-разгрузкой, который не допускает соприкосновения поврежденной области стопы с обувью. Изделие выдерживает давление благодаря тому, что

войлок не деформируются и не сдавливаются, поэтому поврежденный участок оставляют в открытом и свободном состоянии (без оказания давления) для процесса заживления.

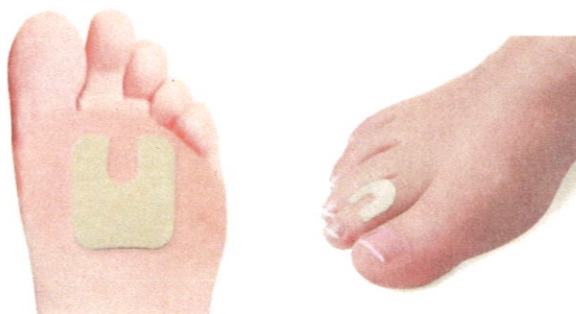


Рисунок 25. Способ применения МИ «Пластырь-разгрузка в форме подковы»

12. Трубочка-разгрузка для пальцев TUBIFOAM:

Используется для уменьшения трения между пальцами, натоптышами и мозолями на коже. Изделие экономично и просто в использовании, очень мягкое на ощупь. Обеспечивает защиту пальцев рук и ног. Легко приспосабливается под форму тела, легко надевается в обувь, т.к. скроено по размеру для идеальной посадки.



Рисунок 26. Способ применения МИ «Трубочка-разгрузка для пальцев TUBIFOAM»

13. Полотно-разгрузка GEL SHEET WITH FABRIC:

Используется для разгрузки давления, т.к. способно приспосабливать свою форму под приложенное к нему давление, обволакивая часть тела пациента, а также перераспределяя пиковое давление на более широкую площадь поверхности. Поскольку полимерный гель растекается во всех направлениях под действием веса или давления, удары, вибрация и прилагаемые силы сводятся к минимуму. Поверхность изделия, контактирующая с кожей, остается изолированной от сил трения, возникающих при натирании кожи. Также полотно-разгрузка имеет высокую устойчивость к проседанию.

После снятия давления изделие принимает первоначальную форму и толщину, сохраняя свое состояние в течение длительного времени.

КОМПЛЕКТНОСТЬ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Варианты исполнения МИ имеют следующую комплектность:

- Вариант исполнения изделия ортопедического для разгрузки и/или снятия давления FRESCO нестерильного:

1. Пластырь-разгрузка MOLESKIN FRESCO в рулонах, варианты исполнения:

- [illegible]

- 2.14. Пластырь-разгрузка ADHESIVE SEMI-HARD FELT в рулонах, на войлочной основе, белый (длина 1000 мм, ширина 300 мм, толщина 2 мм) – 1 шт. в потребительской упаковке;
- 2.15. Пластырь-разгрузка ADHESIVE SEMI-HARD FELT в рулонах, на войлочной основе, белый (длина 1000 мм, ширина 300 мм, толщина 3 мм) – 1 шт. в потребительской упаковке;
- 2.16. Пластырь-разгрузка ADHESIVE SEMI-HARD FELT в рулонах, на войлочной основе, белый (длина 1000 мм, ширина 300 мм, толщина 4 мм) – 1 шт. в потребительской упаковке;
- 2.17. Пластырь-разгрузка ADHESIVE SEMI-HARD FELT в рулонах, на войлочной основе, белый (длина 1000 мм, ширина 300 мм, толщина 5 мм) – 1 шт. в потребительской упаковке;
- 2.18. Пластырь-разгрузка ADHESIVE SEMI-HARD FELT в рулонах, на войлочной основе, белый (длина 1000 мм, ширина 300 мм, толщина 6 мм) – 1 шт. в потребительской упаковке;
- 2.19. Пластырь-разгрузка ADHESIVE SEMI-HARD FELT в рулонах, на войлочной основе, белый (длина 1000 мм, ширина 300 мм, толщина 8 мм) – 1 шт. в потребительской упаковке;
- 2.20. Пластырь-разгрузка ADHESIVE SEMI-HARD FELT в рулонах, на войлочной основе, белый (длина 1000 мм, ширина 300 мм, толщина 10 мм) – 1 шт. в потребительской упаковке;
3. Пластырь-разгрузка VELVET MOLESKIN в листах, варианты исполнения:
 - 3.1. Пластырь-разгрузка VELVET MOLESKIN в листах, на хлопковой основе, розовый (длина 300 мм, ширина 200 мм, толщина 1,9 мм) – 1 / 5 / 15 шт. в потребительской упаковке;
 - 3.2. Пластырь-разгрузка VELVET MOLESKIN в листах, на хлопковой основе, розовый (длина 225 мм, ширина 400 мм, толщина 1,9 мм) – 1 / 4 шт. в потребительской упаковке;
4. Пластырь-разгрузка MOLESKIN FRESCO SPORT в листах, варианты исполнения:
 - 4.1. Пластырь-разгрузка MOLESKIN FRESCO SPORT в листах, на хлопковой основе, розовый (длина 300 мм, ширина 200 мм, толщина 1,5 мм) – 1 / 5 / 15 шт. в потребительской упаковке;
 - 4.2. Пластырь-разгрузка MOLESKIN FRESCO SPORT в листах, на хлопковой основе, розовый (длина 400 мм, ширина 225 мм, толщина 1,5 мм) – 1 / 4 шт. в потребительской упаковке;
5. Пластырь-разгрузка MOLESKIN FLEECY WEB в листах, варианты исполнения:
 - 5.1. Пластырь-разгрузка MOLESKIN FLEECY WEB в листах, на хлопковой основе, бежевый (длина 400 мм, ширина 225 мм, толщина 2 мм) – 1 / 4 шт. в потребительской упаковке;
 - 5.2. Пластырь-разгрузка MOLESKIN FLEECY WEB в листах, на хлопковой основе, розовый (длина 400 мм, ширина 225 мм, толщина 2 мм) – 1 / 4 шт. в потребительской упаковке;
6. Пластырь-разгрузка FRESCO ALIVIO VISCO FIX в листах, варианты исполнения:
 - 6.1. Пластырь-разгрузка FRESCO ALIVIO VISCO FIX в листах, на пенополиуретановой основе, розовый (длина 300 мм, ширина 200 мм, толщина 10 мм) – 1 / 2 шт. в потребительской упаковке;

- 6.2. Пластырь-разгрузка FRESCO ALIVIO VISCO FIX в листах, на пенополиуретановой основе, розовый (длина 300 мм, ширина 200 мм, толщина 25 мм) – 1 шт. в потребительской упаковке;
7. Пластырь-разгрузка ADHESIVE SEMI-HARD FELT в больших рулонах, варианты исполнения:
- 7.1. Пластырь-разгрузка ADHESIVE SEMI-HARD FELT в больших рулонах, на войлочной основе, белый (длина 3000 мм, ширина 100 мм, толщина 4 мм) – 1 шт. в потребительской упаковке;
- 7.2. Пластырь-разгрузка ADHESIVE SEMI-HARD FELT в больших рулонах, на войлочной основе, белый (длина 3000 мм, ширина 100 мм, толщина 6 мм) – 1 шт. в потребительской упаковке;
- 7.3. Пластырь-разгрузка ADHESIVE SEMI-HARD FELT в больших рулонах, на войлочной основе, белый (длина 2000 мм, ширина 100 мм, толщина 8 мм) – 1 шт. в потребительской упаковке;
- 7.4. Пластырь-разгрузка ADHESIVE SEMI-HARD FELT в больших рулонах, на войлочной основе, белый (длина 2000 мм, ширина 100 мм, толщина 10 мм) – 1 шт. в потребительской упаковке;
8. Пластырь-разгрузка в форме овала, варианты исполнения:
- 8.1. Пластырь-разгрузка в форме овала OVAL FELT PADS, на войлочной основе, белый, размер S (длина 27 мм, ширина 20 мм, толщина 2 мм) – 36 / 135 / 540 шт. в потребительской упаковке;
- 8.2. Пластырь-разгрузка в форме овала ADHESIVE SEMI-HARD FELT PADS, на войлочной основе, белый, размер S (длина 27 мм, ширина 20 мм, толщина 2 мм) – 135 / 540 шт. в потребительской упаковке;
- 8.3. Пластырь-разгрузка в форме овала OVAL FELT PADS, на войлочной основе, белый, размер L (длина 45 мм, ширина 34 мм, толщина 2 мм) – 36 / 54 / 216 шт. в потребительской упаковке;
- 8.4. Пластырь-разгрузка в форме овала ADHESIVE SEMI-HARD FELT PADS, на войлочной основе, белый, размер L (длина 45 мм, ширина 34 мм, толщина 2 мм) – 54 / 216 шт. в потребительской упаковке;
- 8.5. Пластырь-разгрузка в форме овала CORN CUSHIONS, на двухслойной пенолатексной основе, розовый-бежевый (длина 27 мм, ширина 20 мм, толщина 3 мм) – 9 / 36 / 135 шт. в потребительской упаковке;
- 8.6. Пластырь-разгрузка в форме овала BUNION CUSHIONS, на двухслойной пенолатексной основе, розовый-бежевый (длина 45 мм, ширина 34 мм, толщина 3 мм) – 4 / 54 шт. в потребительской упаковке;
9. Пластырь-разгрузка в форме круга, варианты исполнения:
- 9.1. Пластырь-разгрузка в форме круга ROUND FELT PADS, на войлочной основе, белый, размер S (внешний диаметр 23 мм, внутренний диаметр 8 мм, толщина 2 мм) – 36 / 153 / 612 шт. в потребительской упаковке;
- 9.2. Пластырь-разгрузка в форме круга ADHESIVE SEMI-HARD FELT PADS, на войлочной основе, белый, размер S (внешний диаметр 23 мм, внутренний диаметр 8 мм, толщина 2 мм) – 153 / 612 шт. в потребительской упаковке;
- 9.3. Пластырь-разгрузка в форме круга ROUND FELT PADS, на войлочной основе, белый, размер L (внешний диаметр 35 мм, внутренний диаметр 15 мм, толщина 2 мм) – 36 / 66 / 264 шт. в потребительской упаковке;

- 9.4. Пластырь-разгрузка в форме круга ADHESIVE SEMI-HARD FELT PADS, на войлочной основе, белый, размер L (внешний диаметр 35 мм, внутренний диаметр 15 мм, толщина 2 мм) – 66 / 264 шт. в потребительской упаковке;
- 9.5. Пластырь-разгрузка в форме круга ROUND CUSHIONS, на двухслойной пенолатексной основе, розовый-бежевый, размер S (внешний диаметр 23 мм, внутренний диаметр 8 мм, толщина 3 мм) – 9 / 36 / 153 шт. в потребительской упаковке;
- 9.6. Пластырь-разгрузка в форме круга ROUND CUSHIONS, на двухслойной пенолатексной основе, розовый-бежевый, размер L (внешний диаметр 35 мм, внутренний диаметр 15 мм, толщина 3 мм) – 4 / 66 шт. в потребительской упаковке;
10. Пластырь-разгрузка в форме «почки», варианты исполнения:
- 10.1. Пластырь-разгрузка в форме «почки» KIDNEY FELT PADS, на войлочной основе, белый, размер M (длина 72 мм, ширина 40 мм, толщина 2 мм) – 36 / 30 / 120 шт. в потребительской упаковке;
- 10.2. Пластырь-разгрузка в форме «почки» ADHESIVE SEMI-HARD FELT PADS, на войлочной основе, белый, размер M (длина 72 мм, ширина 40 мм, толщина 2 мм) – 30 / 120 шт. в потребительской упаковке;
- 10.3. Пластырь-разгрузка в форме «почки» KIDNEY FELT PADS, на войлочной основе, белый, размер L (длина 90 мм, ширина 50 мм, толщина 2 мм) – 36 / 16 / 64 шт. в потребительской упаковке;
- 10.4. Пластырь-разгрузка в форме «почки» ADHESIVE SEMI-HARD FELT PADS, на войлочной основе, белый, размер L (длина 90 мм, ширина 50 мм, толщина 2 мм) – 16 / 64 шт. в потребительской упаковке;
- 10.5. Пластырь-разгрузка в форме «почки» KIDNEY FLEECY WEB PADS, на хлопковой основе, розовый, размер M (длина 72 мм, ширина 40 мм, толщина 2 мм) – 36 / 30 / 120 шт. в потребительской упаковке;
- 10.6. Пластырь-разгрузка в форме «почки» MOLESKIN FLEECY WEB PADS, на хлопковой основе, розовый, размер M (длина 72 мм, ширина 40 мм, толщина 2 мм) – 30 / 120 шт. в потребительской упаковке;
- 10.7. Пластырь-разгрузка в форме «почки» KIDNEY FLEECY WEB PADS, на хлопковой основе, розовый, размер L (длина 90 мм, ширина 50 мм, толщина 2 мм) – 36 / 16 / 64 шт. в потребительской упаковке;
- 10.8. Пластырь-разгрузка в форме «почки» MOLESKIN FLEECY WEB PADS, на хлопковой основе, розовый, размер L (длина 90 мм, ширина 50 мм, толщина 2 мм) – 16 / 64 шт. в потребительской упаковке;
- 10.9. Пластырь-разгрузка в форме «почки» CALLUS & HEEL CUSHIONS, на двухслойной пенолатексной основе, розовый-бежевый (длина 72 мм, ширина 43 мм, толщина 3 мм) – 2 / 30 шт. в потребительской упаковке;
11. Пластырь-разгрузка в форме подковы, варианты исполнения:
- 11.1. Пластырь-разгрузка в форме подковы HORSESHOE FELT PADS, на войлочной основе, белый, размер S (длина 27 мм, ширина 20 мм, толщина 2 мм) – 36 / 150 / 600 шт. в потребительской упаковке;
- 11.2. Пластырь-разгрузка в форме подковы ADHESIVE SEMI-HARD FELT PADS, на войлочной основе, белый, размер S (длина 27 мм, ширина 20 мм, толщина 2 мм) – 150 / 600 шт. в потребительской упаковке;
- 11.3. Пластырь-разгрузка в форме подковы HORSESHOE FELT PADS, на войлочной основе, белый, размер L (длина 44 мм, ширина 50 мм, толщина 2 мм) – 36 / 144 шт. в потребительской упаковке;

- 11.4. Пластырь-разгрузка в форме подковы ADHESIVE SEMI-HARD FELT PADS, на войлочной основе, белый, размер L (длина 44 мм, ширина 50 мм, толщина 2 мм) – 144 шт. в потребительской упаковке;
- 12. Трубочка-разгрузка для пальцев TUBIFOAM, варианты исполнения:
 - 12.1. Трубочка-разгрузка для пальцев TUBIFOAM на хлопково-пенополиуретановой основе, телесная, размер S (длина 250 мм, диаметр 12 мм) – 1 / 6 / 12 шт. в потребительской упаковке;
 - 12.2. Трубочка-разгрузка для пальцев TUBIFOAM на хлопково-пенополиуретановой основе, телесная, размер M (длина 250 мм, диаметр 15 мм) – 1 / 6 / 12 шт. в потребительской упаковке;
 - 12.3. Трубочка-разгрузка для пальцев TUBIFOAM на хлопково-пенополиуретановой основе, телесная, размер L (длина 250 мм, диаметр 18 мм) – 1 / 6 / 12 шт. в потребительской упаковке;
 - 12.4. Трубочка-разгрузка для пальцев TUBIFOAM на хлопково-пенополиуретановой основе, телесная, размер XL (длина 250 мм, диаметр 25 мм) – 1 / 6 / 12 шт. в потребительской упаковке;
- 13. Полотно-разгрузка GEL SHEET WITH FABRIC в листах, варианты исполнения:
 - 13.1. Полотно-разгрузка GEL SHEET WITH FABRIC в листах, на гелевой основе, одностороннее (длина 150 мм, ширина 200 мм, толщина 1 мм) – 1 шт. в потребительской упаковке;
 - 13.2. Полотно-разгрузка GEL SHEET WITH FABRIC в листах, на гелевой основе, одностороннее (длина 150 мм, ширина 200 мм, толщина 2 мм) – 1 шт. в потребительской упаковке;
 - 13.3. Полотно-разгрузка GEL SHEET WITH FABRIC в листах, на гелевой основе, одностороннее (длина 100 мм, ширина 100 мм, толщина 2 мм) – 1 шт. в потребительской упаковке;
 - 13.4. Полотно-разгрузка GEL SHEET WITH FABRIC в листах, на гелевой основе, двустороннее (длина 150 мм, ширина 200 мм, толщина 2 мм) – 1 шт. в потребительской упаковке.

- Эксплуатационная документация:


Инструкция по применению на бумажном носителе – 1 шт. на транспортную тару и в электронном виде по ссылке на русской маркировке потребительской упаковки.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

«Изделие ортопедическое для разгрузки и/или снятия давления FRESCO нестерильное» поставляются в потребительской упаковке. Медицинские изделия, в зависимости от варианта исполнения, могут быть упакованы в пакет, zip-пакет, малый zip-пакет или картонную коробку. Этикетки производителя (изготовителя) с маркировкой вкладываются в каждую потребительскую упаковку (за исключением картонных коробок, т.к. в этом случае маркировка нанесена непосредственно на потребительскую упаковку). Изделия, в зависимости от варианта и объема поставки, могут быть сложены в транспортную упаковку – коробки из гофрированного картона.

СВЕДЕНИЯ О МАРКИРОВКЕ

Значение символов, которые могут быть указаны на маркировке потребительской упаковки:

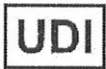	Изготовитель
	Уникальный идентификатор изделия
	Номер по каталогу
	Код партии
	Дата изготовления
	Использовать до
	Медицинское изделие
	СЕ маркировка (Европейский сертификат соответствия)
	Запрет на повторное применение
 или 	Коды переработки материала этикетки 81 – PapPet (картон / пластик) 21 – прочий картон
	Изделие может быть утилизировано, как бытовой отход
	Не допускать воздействия солнечного света
	Не использовать при повреждении упаковки и обратиться к инструкции по применению
	Не допускать воздействия влаги

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Условия транспортировки

- Температура окружающей среды: от -40°C до +40°C;
- Относительная влажность: от 15% до 90%;
- Атмосферное давление: от 70 кПа до 106 кПа.

Условия хранения

- Не подвергайте воздействию влаги.
- Храните в прохладном, хорошо проветриваемом месте.
- Избегайте воздействия прямых солнечных лучей.
- Температура окружающей среды: от +5°C до +40°C;
- Относительная влажность: до 60%
- Атмосферное давление: 70 кПа – 106 кПа

Условия эксплуатации:

- Температура окружающей среды: от -20°C до +40°C;
- Относительная влажность: от 15% до 90%;
- Атмосферное давление: от 70 кПа до 106 кПа.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности медицинского изделия составляет 5 лет с даты изготовления.

Срок годности после вскрытия – неприменимо. Потери свойств изделия или изменения в составе продукции после вскрытия потребительской упаковки не происходят.

СВЕДЕНИЯ О СТЕРИЛЬНОСТИ

Неприменимо. МИ «Изделие ортопедическое для разгрузки и/или снятия давления FRESCO нестерильное» поставляются в нестерильном виде и не подвергаются стерилизации пользователем.

ОПИСАНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ИЛИ ИЗДЕЛИЙ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ МЕДИЦИНСКИМИ, НО ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОМБИНАЦИИ С МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ

Для использования в комбинации с медицинским изделием не предусмотрено каких-либо необходимых медицинских изделий, изделий, не являющихся медицинскими, или принадлежностей.

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ДЕЗИНФЕКЦИИ И ОЧИСТКИ

Неприменимо. Медицинские изделия предназначены для однократного применения.

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ

Неприменимо. Изделия не подлежат техническому обслуживанию или ремонту.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- Утилизация производится согласно законодательству, действующему на территории РФ.
- Утилизация медицинских отходов осуществляется с соблюдением требований Санитарных правил в зависимости от степени их эпидемиологической, токсикологической и

радиационной опасности, а также негативного воздействия на человека и среду обитания человека:

- Согласно классификации медицинских отходов, медицинское изделие «Изделие ортопедическое для разгрузки и/или снятия давления FRESCO нестерильное» относится к классу А (отходы, не имеющие контакт с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными (эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к ТКО, далее - класс А) (СанПиН 2.1.3684-21)).
- Незагрязненная упаковка утилизируется как бытовой отход.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ, КОТОРЫМ СООТВЕТСТВУЕТ МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

Перечень международных стандартов, соответствие которым заявляет производитель (изготовитель) МИ, приведён в Таблице 1.

Таблица 1.

Номер документа	Название
EN ISO 13485:2016/A11:2021	Изделия медицинские. Системы управления качеством. Требования к регулированию
EN ISO 14971:2020	Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям
EN ISO 15223-1:2021	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании медицинских изделий, на этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Общие требования
EN ISO 20417:2021	Изделия медицинские. Информация, поставляемая изготовителем
EN ISO 10993-5:2009	Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность методами <i>in vitro</i>
EN ISO 10993-10:2023	Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования сенсibiliзирующего действия
MDR (EU) 2017/745	Регламент N 2017/745 Европейского парламента и Совета Европейского Союза "О медицинских изделиях, об изменении Директивы 2001/83/ЕС, Регламента (ЕС) 178/2002 и Регламента (ЕС) 1223/2009, а также об отмене Директив 90/385/ЕЭС и 93/42/ЕЭС Совета ЕС"

ГАРАНТИЯ

Производитель (изготовитель) медицинского изделия гарантирует соответствие «Изделия ортопедического для разгрузки и/или снятия давления FRESCO нестерильного» технической документации в течение заявленного срока годности при транспортировке, хранении и эксплуатации в соответствии с настоящей Инструкцией по применению.

РЕКЛАМАЦИИ

Все рекламации относительно обращения медицинского изделия принимает уполномоченный производитель (изготовитель) на территории РФ – ООО «ВСАЛОН24» почтовым отправлением по адресу Россия, 644099, Омская область, г.о. город Омск, г. Омск, ул. Гагарина, д. 14, офис 4,5 или электронным письмом на адрес office@vsalon24.ru.

Форма рекламации: контрольные вопросы

Вы можете воспользоваться данной формой с контрольными вопросами в качестве удобного руководства по тому, какую информацию следует указывать при заполнении формы заявки при обращении к Вашему менеджеру.

Мы надеемся, что это поможет Вам быстро и без дополнительных сложностей разрешить возникшую ситуацию.

Форму рекламации заполняет потребитель. Все поля обязательны для заполнения. Не полностью заполненная заявка не рассматривается.

Контактные данные:	
Наименование изделия:	
Лот (номер партии):	
Дата изготовления или срок годности изделия:	
Укажите подробное описание имеющихся симптомов или признаков проблемы для Вашего продукта. К электронному письму необходимо приложение с фотографиями и видео описываемого дефекта.	